



Veel gestelde vragen

Caninsulin® VetPen®

Hoe lang gaat een VetPen® mee?

- ▶ 3000 injecties. Bij 2x daags injecteren gaat de VetPen® dus ruim 4 jaar mee.

Kan ik de doseerknop 2 kanten opdraaien?

- ▶ Nee. De knop draait maar 1 kant op. Forceert u de knop de verkeerde kant op, dan kan dit de VetPen® onherstelbaar beschadigen.

Ik zie druppeltjes aan de naald?


- ▶ U ziet druppeltjes **NA** het injecteren:
 - Het is normaal om na injectie een klein druppeltje te zien. Dit heeft geen nadelige invloed op de regulatie van uw dier.
 - Houd de naald 5 seconden onderhuids nadat de doseerknop weer is teruggekomen bij de startstreep.
 - Bij hergebruik van de naald is het mogelijk dat de naald deels geblokkeerd raakt. Hierdoor komt de druk die in het insulinepatroon is opgebouwd langzamer vrij en kan de VetPen® gaan nadruppelen. Hergebruik van naalden wordt niet geadviseerd.
 - Het is mogelijk dat de VetPen® gaat druppelen, als er een haarscheurtje in de glazen insulinepatroon zit. Dit kan gebeuren als de VetPen® bijvoorbeeld een keer op de grond is gevallen. Vervang in dit geval het insulinepatroon.
- ▶ U ziet het druppeltje **VOÓR** het injecteren verschijnen, bijvoorbeeld als u aan de doseerknop heeft gedraaid:
 - Het is normaal om een klein druppeltje te zien. Dit heeft geen nadelige invloed op de regulatie van uw dier.

De VetPen® injecteert maar een deel van de dosis, wat moet ik doen?


- ▶ Controleer of het insulinepatroon leeg is. Zo ja, vervang het insulinepatroon. Doseer niet na, in verband met het risico op een te hoge dosis Caninsulin® als een 2^e keer wordt geïnjecteerd. Dieren die 2x daags worden geïnjecteerd krijgen 12 uur later weer een normale dosis. Dieren die 1x daags worden geïnjecteerd krijgen 24 uur later weer een normale dosis.
- ▶ Houd de VetPen® bij het indrukken van de ontspanner zo vast, dat de doseerknop vrij kan draaien.
- ▶ Druk de ontspanner in totdat de doseerknop naar de startstreep is gedraaid. Dan pas de ontspanner loslaten.
- ▶ Bij hergebruik van de naald is het mogelijk dat de naald geblokkeerd raakt. Hergebruik van naalden wordt niet geadviseerd.

Ik heb een te hoge dosis Caninsulin® ingesteld. Wat nu?

- ▶ Spuit de ingestelde dosis weg in de wasbak. Draai de doseerknop niet terug; dit kan de VetPen® onherstelbaar beschadigen.

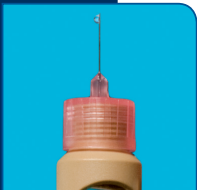

Startstreep

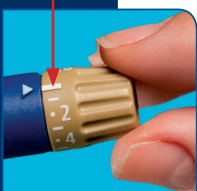



Caninsulin®
VetPen®
Makkelijk exact doseren



Moet ik iedere keer een schoon naaldje gebruiken?

- ▶ Hergebruik van naalden wordt niet geadviseerd.
- ▶ Er kunnen abscessen of pijnlijke spuitplekken ontstaan als u naalden hergebruikt, omdat de naald dan niet meer steriel is.
- ▶ Bij iedere injectie wordt een naald botter. Hergebruik van naalden is dus minder comfortabel voor het dier.
- ▶ Bij hergebruik van de naald kan de naald deels geblokkeerd raken. Dit kan invloed hebben op de dosis Caninsulin® die u het dier toedient.



Hoe krijg ik de lucht uit een nieuw insulinepatroon?

- ▶ Laad het nieuwe patroon in de VetPen®, zet een naald op de VetPen® en houd de naald omhoog gericht.
- ▶ Tik tegen het insulinepatroon totdat alle lucht zich bovenin het patroon heeft verzameld.
- ▶ Een nieuw insulinepatroon bevat ongeveer 14-18 eenheden lucht. Stel de VetPen® in op een aantal eenheden en spuit de lucht uit het insulinepatroon door op de ontspanner te duwen. Ontspanner ingedruwd houden totdat de doseerknop naar de startstreep is gedraaid. Herhaal dit tot alle lucht is verwijderd.
- ▶ Het patroon is goed ont lucht als er een echt straaltje Caninsulin® uit de naald komt.



Ik krijg de lucht niet goed uit het insulinepatroon?

- ▶ Het insulinepatroon bevat twee mengbolletjes die helpen de insuline in oplossing te brengen voor gebruik. Deze kunnen verward worden met luchtbelletjes.
- ▶ Controleer goed of alle lucht zich bovenin het patroon bevindt als de lucht uit het patroon wordt gespoten.
- ▶ Houd de naald omhoog gericht als de lucht uit het patroon wordt gespoten.

Het laatste restje in het insulinepatroon was niet genoeg en nu heb ik maar een deel van de dosis Caninsulin® geïnjecteerd. Wat nu ?

- ▶ Doseer niet na, in verband met het risico op een te hoge dosis Caninsulin® als een 2^e keer wordt geïnjecteerd. Dieren die 2x daags worden geïnjecteerd krijgen 12 uur later weer een normale dosis. Dieren die 1x daags worden geïnjecteerd krijgen 24 uur later weer een normale dosis.

Moet ik na de injectie de naald verwijderen?

- ▶ Ja. Hiermee sluit u het insulinepatroon weer af. Gebruik voor de volgende injectie een nieuwe naald.